


PFLEGEANLEITUNG

von OP-Hauben

medical instinct®
... WE ARE IMPLANTOLOGY!

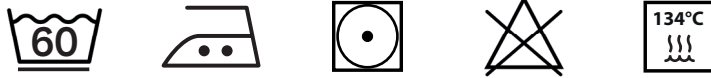

- + 100% Baumwolle / Baumwoll-Mischgewebe
- + Waschbar bei 60°
- + Feinwaschmittel ohne Bleiche verwenden!
- + Schonschleudern / Schontrocknen
- + Die OP-Hauben sind aus 100% Baumwolle können bis 134° sterilisiert werden.
- **BITTE BEACHTEN:** OP-Hauben aus Baumwoll-Mischgewebe sowie OP-Hauben mit Schweißband sind nicht sterilisierbar.



Detaillierte Waschinformationen finden Sie unter: www.medical-instinct.de/praxisbekleidung

Waschmittel:

Bitte seien Sie vorsichtig mit Kompakt-, Universal- oder Vollwaschmittel. Diese enthalten in vielen Fällen Bleichstoffe oder optische Aufheller. Diese machen helle und weiße Wäsche aus reiner Baumwolle zwar leuchtend sauber, können dafür aber farbigen Textilien schaden. Verwenden Sie deshalb bitte ausschließlich Colorwaschmittel für farbige Textilien. Wir empfehlen zudem die Verwendung von Flüssigwaschmittel. Bei der Dosierung folgen Sie bitte der Herstellerempfehlung. Diese gibt die passende Waschmittelmenge für den unterschiedlichen Verschmutzungsgrad in Abhängigkeit vom Härtegrad Ihres Leitungswassers an.

Maschinentrocknung:

Beim Einsatz eines Wäschetrockners beachten Sie bitte, dass sich nur ähnliche Textilien in der Trommel befinden und vorher schonend geschleudert wurden. Die Trommel des Trockners darf auf keinen Fall überladen werden. Wir empfehlen die Einstellung 11 bügeltrocken“. Ihre Wäsche wird so nicht überdrossnet und auch vor starkem Knittern geschützt. Nach dem Trocknen kurz an der Leine ausdampfen lassen. Baumwolle ist eine natürliche Faser. Sie dehnt sich bei Feuchtigkeit aus und zieht sich beim Trocknen zusammen. Der Schrumpfungsprozess von Textilien aus reiner Baumwolle kann bis zu 8% betragen.

Erklärung der Symbole:



bis 60° waschbar



Bügeln mit mittlerer Temperatur



Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)



Bleichen nicht erlaubt



sterilisierbar im Dampf-Sterilisator (Autoklav)

