

PFLEGEANLEITUNG

von OP-Hauben

medical instinct®

... WE ARE IMPLANTOLOGY!



- + 100% Baumwolle / Baumwoll-Mischgewebe
- + Waschbar bei 60°
- + Feinwaschmittel ohne Bleiche verwenden!
- + Schonschleudern / Nicht im Trockner trocknen
- + Die OP-Hauben sind aus 100% Baumwolle können bis 134° sterilisiert werden.
- **BITTE BEACHTEN:** OP-Hauben aus Baumwoll-Mischgewebe sowie OP-Hauben mit Schweißband sind nicht sterilisierbar.



Detaillierte Waschinformationen finden Sie unter: www.medical-instinct.de/praxisbekleidung

Waschmittel:

Bitte seien Sie vorsichtig mit Kompakt-, Universal- oder Vollwaschmittel. Diese enthalten in vielen Fällen Bleichstoffe oder optische Aufheller. Diese machen helle und weiße Wäsche aus reiner Baumwolle zwar leuchtend sauber, können dafür aber farbigen Textilien schaden. Verwenden Sie deshalb bitte ausschließlich Colorwaschmittel für farbige Textilien. Wir empfehlen zudem die Verwendung von Flüssigwaschmittel. Bei der Dosierung folgen Sie bitte der Herstellerempfehlung. Diese gibt die passende Waschmittelmenge für den unterschiedlichen Verschmutzungsgrad in Abhängigkeit vom Härtegrad Ihres Leitungswassers an.

Maschinentrocknung:

Maschinentrocknung wird nicht empfohlen, da Baumwolle eine natürliche Faser ist. Sie dehnt sich bei Feuchtigkeit aus und zieht sich beim Trocknen zusammen. Der Schrumpfungprozess von Textilien aus reiner Baumwolle kann bis zu 8% betragen.

Erklärung der Symbole:



bis 60° waschbar
schonend schleudern



Bügeln mit mittlerer
Temperatur



Nicht im
Trockner trocknen



Bleichen nicht erlaubt



sterilisierbar im
Dampf-Sterilisator
(Autoklav)

